



お口の万歩計 摂食咀嚼トレーニング & 自動算定ソフト

## 「カミ丸君 Pro」

よく噛んで食べることには意味がある。

アプリを使って咀嚼をサポート！！専用骨伝導イヤホンマイク「マイ Q」を使用してハンズフリーで咀嚼音を自動カウントします。一口30回噛むことを目標に、個々に適した設定が行えます。咀嚼する(噛む)トレーニングを行い、トレーニング結果を登録、管理することができるアプリです。カミ丸君プロを使って、食事でじっくり噛む、しっかり噛む、噛む噛む咀嚼習慣をつけて健康的な生活を目指しましょう！

### ＜カミ丸君 Pro ができること＞

毎食事時など、ハンズフリーで咀嚼データをカウントし、記録します。動画又はカウント音等に合わせて咀嚼の練習ができます。記録した咀嚼データをチェックして自分の噛み方を把握し、健康的な生活を目指せます。咀嚼の練習・咀嚼データ取得時は、自分のお気に入りの音楽及び画像を見ながら、行えます。身長・体重・血圧・健康メモなどを記録し、チェックすることができます。咀嚼回数等をグラフ表示できます。(詳細はマニュアル本をご覧ください。)

### ＜一台のスマートフォンで10名までのトップ画面でユーザー登録が行えます。＞

咀嚼トレーニング、咀嚼のリハビリ等でその都度使用する人が異なる場合など、10名までが登録できご利用になれます。

### ＜赤ちゃん・介護用の追加について＞

咀嚼をこれから練習する赤ちゃん、そしてよく噛むことを事情により忘れた高齢者の方用にこの画面を追加しました。できるだけ見る側にインパクトを与える為画面のいっぱいの口の動画にしました。全ての動作は模倣から学ぶといえます。この口の動きに関心を示し、ついには真似をして口を動かすようになればと考えました。

### ＜ご利用になる前に＞


骨伝導で耳穴から咀嚼音を感知し、それを自動カウントできるアプリです。空噛みでは99%の精度で音を拾いますが、会話時の高い音にも反応しカウントします。カウントの精度にこだわらなければ会話をしながらの食事時にもご利用下さい。又、このアプリは骨伝導で頭蓋骨内の音を感知する仕組みなので、稀ですが体調により(頭蓋骨内の内圧の変化)カウントの精度が著しく低下することがあります。アダプタの装着に問題がないのに精度の低下が起こる場合があることをご理解ください。

### ＜お口の万歩計「カミ丸君 Pro」ご利用に必要なもの＞

- 1) スマートフォン( 아이폰、アンドロイド系<例>ギャラクシー)、アイパッド、アイポットタッチ、タブレット(アンドロイド系<例>ギャラクシー タブ)版  
ネット接続ができ、アップルストア及びアンドロイドマーケットからアプリケーションがダウンロードできる機器であれば OK です。アップルストアでは85円、アンドロイドマーケットでは99円でインストール時に有料になります。
- 2) カミ丸君プロ専用骨伝導イヤホンマイク「マイ Q」(500円) トップ画面下の「・・・販売」(ヤフオフ)よりお求めいただけます。

又は kamikami@kamplate.com までお問い合わせください。


- 3) イヤホンマイクがなくても摂食・咀嚼トレーニング及び赤ちゃん・介護用画面はご利用いただけます。

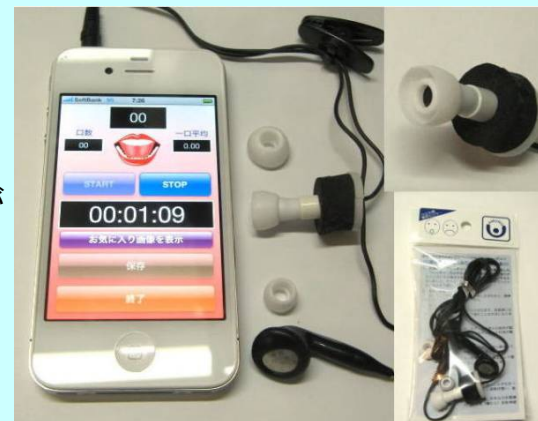

カミ丸君プロ専用骨伝導イヤホンマイク(500円)

## 「カミ丸君 Pro」を使ってみよう

- ① アプリケーションから「カミ丸君 Pro」を選択します。  
→「カミ丸君 Pro」初期画面が表示されます。
- ② メンバー新規登録ボタンをタップしてメンバー登録をします。

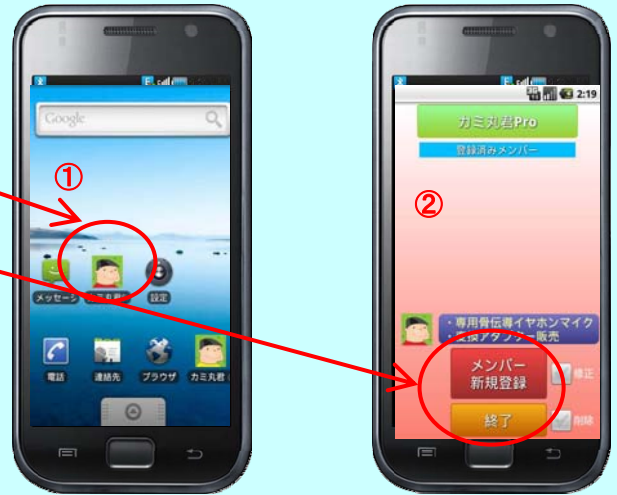

カミ丸君初期画面

③

設定したリズムに合わせて咀嚼の練習→**摂食咀嚼トレーニングボタン** **摂食咀嚼トレーニング** をタップします。

赤ちゃん・高齢者の咀嚼運動の獲得・回復のアプローチ→**赤ちゃん・介護用ボタン** **赤ちゃん・介護用** をタップします。

食事の際の噛む時のデータを記録→**摂食咀嚼自動カウントボタン** **摂食咀嚼自動カウント** をタップします。

履歴を表示→ **履歴表示ボタン** **履歴表示** をタップします。

履歴の編集→ **履歴編集ボタン** **履歴編集** をタップします。

お気に入りの画像を登録→**お気に入り画像登録ボタン** **お気に入り画像登録** をタップします。

お気に入りの音楽を登録→**お気に入り音楽登録ボタン** **お気に入り音楽登録** をタップします。

各種設定→**設定ボタン** **設定** をタップします。

「カミ丸君Pro」を終了→**終了ボタン** **終了** をタップします。

ダウンロードは **android マーケット(アンドロイド版)**、**App Store(iphone 版)** からどうぞ。

検索キーワードは **android マーケット:「カミ丸」、App Store(iphone 版):「kamimaru」**です。



メニュー画面

## <専用イヤホンマイク「マイQ」の使用法及びお取り扱い上のご注意>

1) 耳穴の大きさに合わせて大中小のイヤカバーの中から合ったカバーを選択下さい。又はノーカバーでもかまいません。

イヤカバーをマイQ本体の円形スポンジベースを持ち、マイQ先端にセットし、マイQの先端部を耳穴に挿入下さい。挿入後耳穴に密着させる為、円形のスポンジベースを持ちゆっくり回転させて下さい。マイQ本体を持って操作を行う時は必ず、スポンジベースを持って操作を行って下さい。ツーン(飛行機搭乗時に起こると類似の現象)とした状態が密着の目安です。

2) 密着度が高いとカウント精度が過剰に反応する場合があります。その際は自動カウントをストップした後スポンジベースをゆっくり回して緩めて下さい。

3) センサマイク「マイQ」は感度が敏感にできています。咀嚼カウントのスタート(オン)は必ず、耳に「マイQ」を装着後行って下さい。

取り外す際は咀嚼カウントをストップ(オフ)にして取り外してください。自動カウントスタート(オン)時にコードを揺する又は擦る行為は過剰にカウントする原因となりますのでご注意ください。咀嚼カウントがスタート(オン)の状態「マイQ」を強くタッチしたり、コードを激しく揺する又は擦る事は禁じます。マイクの接続が切れる(オフ)原因になります。その際は、再度電源を立ち上げてご利用下さい。このことが原因となる連続したマイク切断はスマートフォン本体に過大な負担がかかることを十分留意してご使用下さい。

4) 使用法及びお取り扱い上の注意に留意せず使用した際に生じた事故、故障等につきましては当ショップでは一切の責任は負えませんので了承の上、本商品をご使用願います。